

I. osztályú orvostechnikai eszköz az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 745/2017/EU rendelet (MDR) szerint, és mint ilyen, megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek.

Az orvostechnikai eszköz helyes rendeltetésének és optimális működésének biztosítása érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, mielőtt első alkalommal használja. Ellenőrizze a termék megfelelő külső megjelenését és integritását, valamint a csomagolás sértetlenségét.

**A CSOMAG TARTALMA:** 1 kerekesszék öv, 1 használati útmutató, 1 reklámlap.

**INDIKÁCIÓK:** A beteg kényelmes rögzítése a kerekesszékhez, mely megakadályozza az esetleges leeséseket és megcsúszást. Bővítés lehetősége a személyre szabott adaptációhoz a CAD16 hosszabbítóval kombinálva.

**KONTRAINDIKÁCIÓK:** A termék használata ellenjavallt a páciens izgatottsága esetén, valamint olyan páciensek esetében, akik leválaszthatják magukról az eszközt, vagy önállóan ki tudják oldani a csatokat. Ne használja allergia esetén valamely összetevőre.

**BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK:** Javasoljuk, hogy a terméket megfelelő végzettségű, szakképzett személy helyezze fel. A termék állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az eredeti terméket nem szabad módosítani. A termék nem érintkezhet közvetlenül sérült területtel. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizzék és kövessék nyomon a termék helyes használatát a felhasználó által. Soha ne hagyja az eszközt olyan gyermekek és / vagy személyek számára elérhető helyen, akik nem tudnak vigyázni magukra. Az alkatrészek textil jellegéből adódóan ne tegye ki a terméket hőforrásnak. Nincsenek ismert mellékhatások.

#### FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ:

- 1 Ültesse a felhasználót a kerekesszékbe..
- 2 Helyezze a párnázott részt a felhasználó hasára, és vezesse a pántokat a szék hátuljához.
- 3 Zárja be a csatot, és állítsa be a pántokat a kívánt hosszúságra.

#### MÉRET:

KÓD – MÉRET – SZÉLESSÉG – HOSSZÚSÁG


AD11 – 0 - 12.5 cm – 40 cm

AD11 – 1 – 16.5 cm – 56 cm

AD11E – 1 – 12.5 cm – 56 cm

**ÖSSZETÉTEL:** 100% poliészter laminált szövet. Pánt: 100% poliészter. Csat: Acetál.

**TÁROLÁS ÉS ÁPOLÁS:** Gépi mosás legfeljebb 60 C°-on. Tilos vegytisztítani vagy vasalni. Ne szárítsa szárítógépben. Mosáskor csukja be a csatot. Ne használjon fehérítőszert. Tárolja száraz, fénytől védett helyen, szobahőmérsékleten, eredeti csomagolásában.

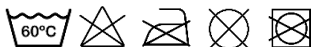


**HASZNÁLAT:** Terápiás céljaira tekintettel ezt a terméket más személy nem használhatja fel újra.

**HULLADÉKKEZELÉS:** A hulladékkezelés tekintetében a termék és alkatrészei megfelelnek a helyi hatóságok által megállapított hatályos rendelkezéseknek.

**JÓTÁLLÁS:** 24 hónap a vásárlás időpontjától számítva. Reklamációhoz meg kell őriznie a számlát a vásárlás igazolásaként. A terméket kizárólag az ebben a használati útmutatóban leírt felhasználásra szánják. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá. A kártérítés az áru értékére korlátozódik. A következményes kártérítés kifejezetten kizárt.

Gyártó:

 SHANAE SERVICIOS GERIÁTRICOS S.L  
Pl. Talluntxe II, C/c- nº68 – 31110 Noain (España)

Forgalmazó:

Thuasne Hungary Kft.  
1117 Bp, Budafoki út 60.