

I. osztályú orvostechnikai eszköz az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 745/2017/EU rendelet (MDR) szerint, és mint ilyen, megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek.

Az orvostechnikai eszköz helyes rendeltetésének és optimális működésének biztosítása érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, mielőtt első alkalommal használja. Ellenőrizze a termék megfelelő külső megjelenését és integritását, valamint a csomagolás sértetlenségét.

**A CSOMAG TARTALMA:** 1 kerekesszék mellény, 1 használati útmutató, 1 reklámlap.


**INDIKÁCIÓK:** Megfelelő törzsszabílitást biztosít a gyenge izomtónusú felhasználók számára. Megakadályozza az oldalirányú elmozdulást.

**KONTRAINDIKÁCIÓK:** A termék használata ellenjavallt a páciens izgatottsága esetén, valamint olyan páciensek esetében, akik leválaszthatják magukról az eszközt, vagy önállóan ki tudják oldani a csatokat. Ne használja allergia esetén valamely összetevőre.

**BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK:** Javasoljuk, hogy a terméket megfelelő végzettségű, szakképzett személy helyezze fel. A termék állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az eredeti terméket nem szabad módosítani. A termék nem érintkezhet közvetlenül sérült területtel. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizzék és kövessék nyomon a termék helyes használatát a felhasználó által. Soha ne hagyja az eszközt olyan gyermekek és / vagy személyek számára elérhető helyen, akik nem tudnak vigyázni magukra. Az alkatrészek textíli jellegéből adódóan ne tegye ki a terméket hő- vagy nedvességforrásnak. Nincsenek ismert mellékhatások.

#### FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ:

1. Ültesse a páciens a kerekesszékbe.
2. Helyezze a mellényt a páciensre.
3. Csatlakoztassa az alsó pántokat a csat bekapcsolásával, és állítsa be a szükséges méretet.
4. A mellény hátulján lévő pántot át kell vezetni az elől lévő pánton, és hátul kapcsolja be a csatot. Lásd az oldalt lévő képet.

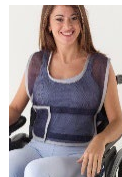

#### MÉRETTÁBLÁZAT:

MÉRET	KITERJEDÉS
0	29X40 CM
1	39X59 CM

**ÖSSZETÉTEL:** 100% poliamid hálós szövet. Pánt: 100% poliészter. Csat: Acetál. Fonál: 100% Nylon

**TÁROLÁS ÉS ÁPOLÁS:** Gépi mosás legfeljebb 60 °C-on. Tilos vegytisztítani vagy vasalni. Ne szárítsa szárítógépben. Mosáskor csukja be a csatot. Ne használjon fehérítőszert. Tárolja száraz, fénytől védett helyen, szobahőmérsékleten, eredeti csomagolásában.




**HASZNÁLAT:** Terápiás céljaira tekintettel ezt a terméket más személy nem használhatja fel újra.

**HULLADÉKKEZELÉS:** A hulladékkezelés tekintetében a termék és alkatrészei megfelelnek a helyi hatóságok által megállapított hatályos rendelkezéseknek.

**JÓTÁLLÁS:** 24 hónap a vásárlás időpontjától számítva. Reklamációhoz meg kell őriznie a számlát a vásárlás igazolásaként. A terméket kizárólag az ebben a használati útmutatóban leírt felhasználásra szánják. A nem rendeltetészerű használatból eredő károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá. A kártérítés az áru értékére korlátozódik. A következményes kártérítés kifejezetten kizárt.

Gyártó:


**SHANAE SERVICIOS GERIÁTRICOS S.L.**  
 Pl. Talluntxe II, C/- n°68 – 31110 Noain (Espanña)

Forgalmazó:

Thuasne Hungary Kft.  
 1117 Bp, Budafoki út 60.