

ADX23 HÁTIZSÁK TÍPUSÚ MELLKASRÖGZÍTŐ KEREKESZÉKHEZ

ADX23C HÁTIZSÁK TÍPUSÚ KLIPSZES MELLKASRÖGZÍTŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

I. osztályú orvostechnikai eszköz az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 745/2017/EU rendelet (MDR) szerint, és mint ilyen, megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek. Az orvostechnikai eszköz helyes rendeltetésének és optimális működésének biztosítása érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, mielőtt első alkalommal használja. Ellenőrizze a termék megfelelő külső megjelenését és integritását, valamint a csomagolás sértetlenségét.

A CSOMAG TARTALMA: 1 mellkasrögzítő, 1 használati útmutató, 1 reklámlap.


INDIKÁCIÓK: Alkalmos görcsös mozgású vagy nem megfelelő törzshelyzetű páciensek számára. Csatok gyors állítással és feszeség állítással. Gyors pozicionálás elülső nyílással egy klipszes csat segítségével.

KONTRAINDIKÁCIÓK: A termék használata ellenjavallt valamely összetevőre való allergia esetén.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK: Javasoljuk, hogy a terméket megfelelő végzettségű, szakképzett személy helyezze fel. A termék állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az eredeti terméket nem szabad módosítani. A termék nem érintkezhet közvetlenül sérült területtel. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizzék és kövessék nyomon a termék helyes használatát a felhasználó által. Soha ne hagyja az eszközt olyan gyermekek és / vagy személyek számára elérhető helyen, akik nem tudnak vigyázni magukra. Az alkatrészek textil jellegéből adódóan ne tegye ki a terméket hő- vagy nedvességforrásnak. Nincsenek ismert mellékhatások.

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ:

- I. Ültesse a páciens a kerekesszékekbe.
- II. Helyezze a rögzítőt a páciensre úgy, hogy az alsó pántokat a kerekesszék csőveihöz igazítja.
- III. Helyezze a felső részt a páciensre, állítsa be a szükséges méretet, és csavarja a székhez (ADX23), vagy csatlakoztassa a csatokat x alakban, ahogy a képen látható (ADX23C).

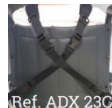


MÉRETEK:

Méret	Váll szélesség
0	33-43 cm
1	43-53 cm
2	53-63 cm

ANYAGÖSSZETÉTEL:

Kétoldalas neoprén-kloroprén, 100% nylon bevonattal. Bélés: 100% poliészter. Zipár: poliészter. ADX23: tömítőgyűrűk: acetál ADX23C: csatok: műanyag

TÁROLÁS ÉS ÁPOLÁS: Gépi mosás legfeljebb 30 °C-on. Tilos vegytisztítani vagy vasalni. Ne szárítsa szárítógépben. Mosáskor csukja be a csatot. Ne használjon fehérítőszert. Tárolja száraz, fénytől védett helyen, szobahőmérsékleten, eredeti csomagolásában.

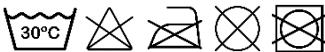


HASZNÁLAT: Terápiás céljaira tekintettel ezt a terméket más személy nem használhatja fel újra.

HULLADÉKKEZELÉS: A hulladékkezelés tekintetében a termék és alkatrészei megfelelnek a helyi hatóságok által megállapított hatályos rendelkezéseknek.

JÓTÁLLÁS: 24 hónap a vásárlás időpontjától számítva. Reklamációhoz meg kell őriznie a számlát a vásárlás igazolásaként. A terméket kizárólag az ebben a használati útmutatóban leírt felhasználásra szánják. A nem rendeltetészerű használatból eredő károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá. A kártérítés az áru értékére korlátozódik. A következményes kártérítés kifejezetten kizárt.

A termékkel kapcsolatos bármely súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak és illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó és / vagy a beteg tartózkodik.

Gyártó:

 SHANAE SERVICIOS GERIÁTRICOS S.L.
Pl. Talluntxe II,C/- nº68 – 31110 Noain (Espanya)

Forgalmazó:

Thuasne Hungary Kft.
1117 Bp, Budafoki út 60.