

Állítható magasságú összecukható szoba WC Mobiak

Használati utasítás

Rendeltetészerű használat:

A szoba wc-t mozgásukban korlátozott személyek használhatják segédeszközként, akik nem tudnak kimenni a WC-re. Csak beltéri használatra tervezték.

Műszaki adatok:

- Keret acélból
- Állítható magasságú



Méretetek:

REF.:						
0809155	45cm	41cm	54cm	46-56cm	7Kg	100Kgr
0809156	45cm	41cm	54cm	45-56cm	7,2Kg	100Kgr

Karbantartás és tisztítás:

Használat után azonnal tisztítsa meg a WC-tartályt. Először öblítse le meleg vízzel. Ezután használjon puha ruhát és enyhe tisztítószeret. Törölje tisztára a tartályt.

FIGYELEM: Ne használjon savas és maró hatású tisztítószereket.

Javasoljuk, hogy a terméket enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg, hogy megóvja az olajfoltoktól és a portól. Az általános gyakorlat az antibakteriális szappan és víz keverékével töltött spray-palack használata. Permetezze a felületre, majd törölje le tiszta törlővel. A legjobb megoldás, ha meleg

enyhe szappanos vízzel tisztítja, majd alaposan szárítsa meg. Ne dohányozzon, és ne használjon lángot a termék közelében. Védje a terméket a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

FONTOS!

A szoba wc használata előtt győződjön meg a következőkről:

- Teljesen kinyitott állapotban van, és ebben a helyzetben reteszelve van.
- A kerekek (ha vannak) szilárdan rögzítve vannak.
- Az ülés megfelelően van elhelyezve és rögzítve ebben a helyzetben.
- A tartály megfelelően van behelyezve a megfelelő nyílásba.
- Nincsenek repedések vagy törések a kereten.

FIGYELEM!

Ha a fentiek bármelyikében probléma lép fel, ne használja a szoba wc-t, amíg a probléma meg nem oldódott.

TOVÁBBI UTASÍTÁSOK:

- Amikor ül vagy feláll a szoba wc-ről, támaszkodjon a kartámaszokra így az eszköz nem csúszik.
- Amikor kiszáll a szoba wc-ből, mindkét kartámaszra egyformán támaszkodnia kell. Ha csak az egyiket használja, a szoba wc könnyen felborulhat és sérülést okozhat vagy károsodhat a termék.
- Rendszeresen tisztítsa meg a szoba wc-t.
- Ne hagyja, hogy a termék nedves legyen.
- Ne engedjen gyermekeket a szoba wc közelébe felügyelet nélkül.

Nem minősül orvostechnikai eszköznek, orvosi célú felhasználásra nem alkalmas.

Környezetvédelem:

Ha a termék elhasználódott vagy cserére szorul, a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével tegye meg:

- 1) Ne dobja ki a készüléket a normál hulladékokkal együtt.
- 2) Lépjen kapcsolatba hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt, a hulladékudvarok elhelyezkedéséről, amelyekbe az eszközt le lehet adni.