


Használati utasítás BELLAVITA kádlift

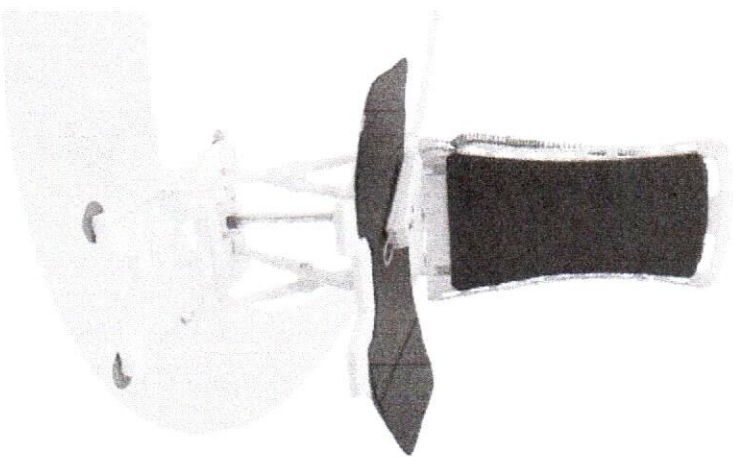

Áttekintés

A kádlift segítségével nyújt mindennapi hygieniához. Azok számára fejlesztették ki, azok részben, vagy egészében akadályoztatottak fizikailag a fürdésben. A termék célja, hogy segítséget nyújtva a használójának szabadságot és minimitást adjon.

A kádlift fel és le mozgatja a beteget a fürdőkádban, valamint kényelmes hatradolást biztosít. Akkor javasolt, ha a ki- és beszállás, valamint a kádba való beülés és kádból felállás nehezséget jelent.

**PONTOS FIGYELMEZTETÉS -
HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA
EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST.**



Pontos információk:

- Soha ne használja a kádliftet a kádba történő be- és kimosására segédesszereként. Ne használja a liftet állványként, emelőszerkezetként, támasztként és hasonló funkciókban a lakásban. A liftet kizárólag a kádban történő használatra fejlesztették ki.
- Az állapotokat tartsa távol a készüléktől.
- Soha ne javítsa önmaga a készülékez meghibásodás esetén, hanem keresse fel legközelebbi partnerét.
- Csak akkor emelje, vagy süllyessze a liftet, ha a háttámla függőleges pozícióba állította és biztosította.
- Hőforrás közelébe ne állítsa a készüléket!
- Szállítás előtt győződjön meg, hogy a távirányítót elvárolította-e!
- Amennyiben hidegben történik a szállítása, akkor használja előtt várja meg, amíg a készülék teljesen átmegy az izzadási hőmérsékletre.
- Amennyiben fürdőolajjal, vagy –sól használ körtékinöten az ajánlott mennyiséget használja csak a vízbe, mert különben a készülék alkatrészeinek megcsúszásához vezethet.
- Ecetsavas tisztítószer soha ne használjon a lift tisztításához.

Az akkumulátorral és a távirányítóval kapcsolatos információk:

- a távirányítót kizárólag a lift mozgására használja
- a liftet csak az eredeti távirányítóval használja
- soha ne helyezze a távirányítót sugárzó meleg, hőhatás közelébe
- ne szedje szét a távirányítót, mert a készülék meghibásodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet csak az eredeti töltőt használja az akkumulátor töltéséhez
- A töltőt csak a kádban kívül, száraz helyiségben használja.
- **NAGYON PONTOS, HOGY AZ AKKUMULÁTORI TÖLTÉSE PEL AZ ELSŐ HASZNÁLATI ELŐTT TELJESEN!**
- Amennyiben nem használja a kádliftet hosszú ideig, akkor 3 havonta töltsse fel az akkumulátort azért, hogy az élettartama ne csökkenjen.
- Ne dnygon áramvezető tulajdonságú eszközt a jack tudóba.
- A távirányítót húzza ki az aljzatából tisztítás megkezdése előtt.
- Száraz ruhával tisztítsa csak a távirányítót.
- A kádlift erős anyagokból készült, de erős ütődésre megsérülhet. Amennyiben erre utaló jelet tapasztal, vagy lát azonnal forduljon a szakkereskedőhöz.

Forgalmazza: MDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:88/412-186
e-mail: info@gyogyaszati.hu web: www.gyogyaszati.hu



Forgalmazza: MDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:88/412-186
e-mail: info@gyogyaszati.hu web: www.gyogyaszati.hu



Fontos biztonsági szabályok:

- A használat megkezdése előtt helyezkedjen a lift középső részére, dőljön hátra a háttámasznak, lábat küssé egyenesítse ki és egyik kezével kapaszkodjon a kád szélében.
- A lift mozgásúg kapaszkodjon a fűrdőkád oldalában.
- Fogytakós személy esetében a használat csak kísérő személy jelenlétével ajánlott.
- Használat megkezdése előtt végezzen próbamoagatásokat, hogy a lift megfelelően működik-e.
- Ne hagyjon a vízben olyan tárgyat, amely a meghibásodást okozhat a liften (pl. fogkefe ...) beszorulva a készülék tartószerkezetébe.

Elektromos biztonsági nyilatkozat:

A készülék megfelelő a Európai Unió tagállamaira ajánlasként tett EMV, IEC 60601-1-2, 89/336/EWG irányelveknek. Ez az jelenti, hogy a környező elektromágneses jelenségek a készülék használatát igen kis valószínűséggel képesek megzavarni. Ennek ellenére előfordulhat, hogy néhány készülék használata (pl. mobil telefon) átmeneti zavart eredményez. Ennek ellenére tartsa távol a lifttől az összes, az életre is veszélyes elektromos eszközt. Amennyiben ennek ellenére zavart észlel a készülék működésében, kérje tanácsát a szakkereskedőnek.

Kicsomagolás:

Kérjük győződjön meg, hogy a csomag tartalmazza-e az alábbi részeket:

1. lift, háttámla és távirányító
2. ülő lap az oldalszármakkal
3. akkumulátor töltő
4. használati utasítás

5. az alaplapon elhelyezett 4 db, 75 mm átmérőjű tapadókorong

Bármelyik rész hiányát, vagy sérülését észleli, jelezze a kereskedőjének.

Először a töltőt csomagolja ki, majd az összes többi egységet. Őrizzze meg a termék dobozát a későbbi esetleges szállítás miatt. Mindenek előtt figyeljen rá, hogy a használat megkezdése előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. Ehhez olvassa el az akkumulátor töltésről szóló részt.

Kádba való behelyezés:

Helyezze a 4 tapadó korongot a lift aljára. A korongok fűleit úgy fordítsa, hogy jól hozzáférjen, ugyanis ezek segítenek a lift könnyű eltolításához.




Figyelemztetés:

A szivó korongokat szilárdan jól illeszkedésben helyezze el a lift alján, mert csak ekkor fogja tudni kivitelezni a tisztítást és szárítást megfelelően. Elszennyeződés esetén általános tisztítószernel lehet a korongokat megtisztítani.


Bizonyosodjon meg róla, hogy a kád tiszta, szennyezés mentes.

Helyezze a kádliftet az üres kád aljára, majd győződjön meg arról, hogy a tapadó korongok jól illeszkednek a lifthez és a kádhoz egyaránt.

Biztonságosabb tapadás érdekében még kettő, azaz összesen 6 db tapadókorong helyezhető el a lift alján.

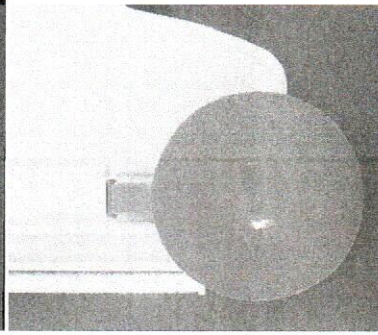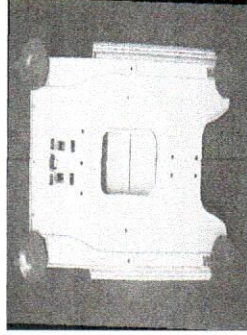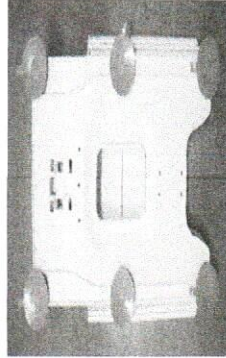


Helyezze el a vezérő egység-hátlap integrált egységet a hordozó alap egységre.

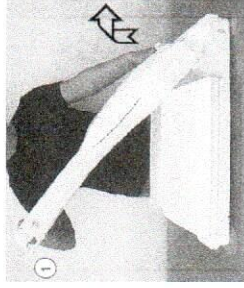

Fogja meg a háttámlát a felső részen elhelyezett markolatánál fogva, majd a másik kezével segítve döntse hátrafelé az ellenállásig (a kép szerint).


FONTOS: mindkét vezető csap helyezkedjen megfelelően a kialakított helyén el.

1 – fogantyú

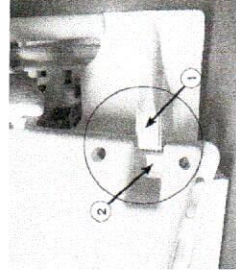


2 – fogadegység

3- csap

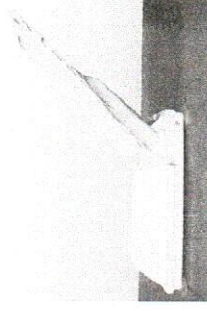


Ez követően bizonyosodjon meg, hogy a háttámla biztos pozícióban

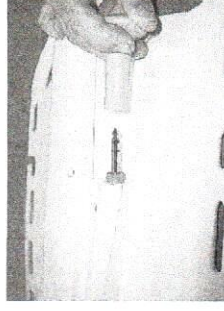

Csatlakoztassa a távirányítót a lifthez. Nyomja rá az aljzatot a jackdugóra addig, amíg a jack dugó alján elhelyezett piros jel el nem tűnik.

Megjegyzés: Amennyiben a háttámla hátradöntését zavarja a kád, helyezze előrébb a kádlift alját.

Ez követően ellenőrizze, hogy az emelő rudazat megfelelően van-e pozícionálva.



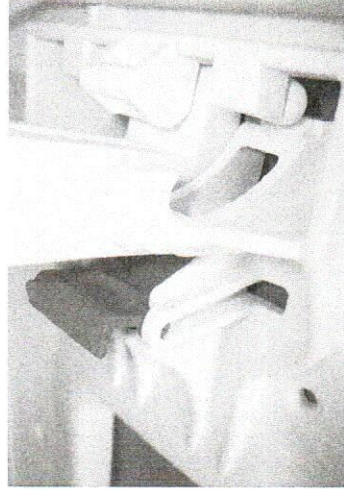


Forgalmazza: MDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:88/412-186
e-mail: info@gyogyszati.hu web: www.gyogyszati.hu






Forgalmazza: MDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:88/412-186
e-mail: info@gyogyszati.hu web: www.gyogyszati.hu

A takaró felhelyezése és eltávolítása:
A takaró felhelyezése és eltávolítása könnyen kivitelezhető. Helyezze a takarót a háttámlára és hújjassa át a markolatot nyitásban. Pattintsa be a rögzítő csapot a furatba. Ugyan így járjon el az ülés erre kialakított részén is.
A takaró eltávolításához emelje meg a rögzítő gomb körül a szövetet két kézzel.
A kádifit használható takaró nélkül is.

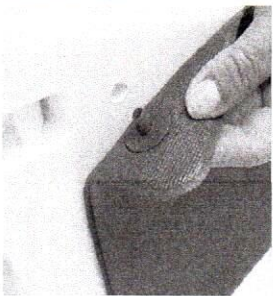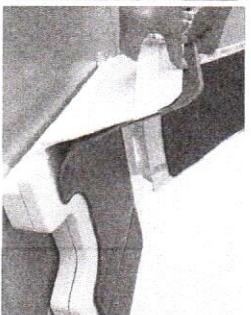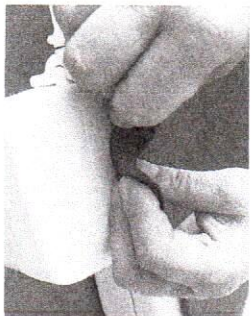

A fejrató felhelyezése
(opcionálisan vásárolható meg):
Helyezze be a fejratókat két oldalról a háttámszerezre kialakított furatba.
Állítsa be a fejratókat a kívánt magasságra.

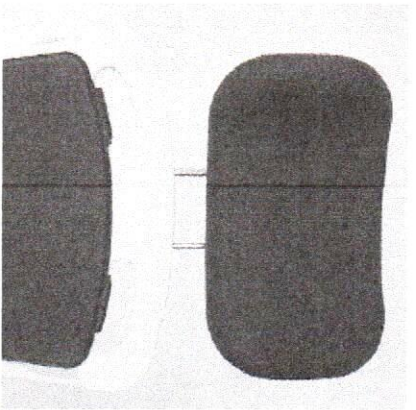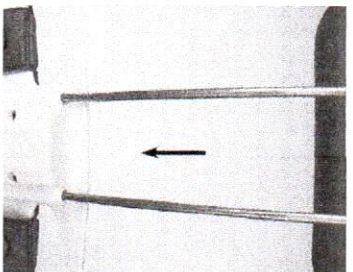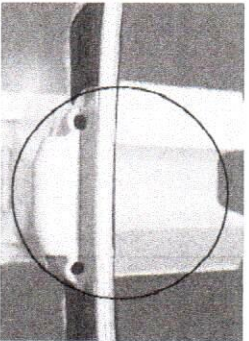

Gombok kiosztása:

1. stüllyesztő gomb (a lift stüllyed)
2. sürgősségi kikapcsoló gomb (vörös)
3. kontrol LED lámpa
4. emelő gomb (a lift emelkedik)
5. bekapsoló gomb (zöld)

A használati útmutató függően maximum 6 fűtéshez elegendő egy fűtőtesttel az akkumulátor. Fűtés alatt a zöld színt LED lámpa jelzi a működést.

Amennyiben a gyártó által meghatározott szint alá esik az akkumulátor feszültsége a lámpa narancssárgára vált és lassan villogni kezd. Az jelzi a készlet, hogy már csak 1 fűtés kivételzésére elég energia van az akkumulátorban. Javasolt a töltés.

Amennyiben még is a liftet tovább használja, úgy a lámpa fénye vöröse vált és villogni kezd. Ekkor a liftet már csak feltétlenül mozgatni, ezzel biztosítva a kiszállás kivételzését. Ekkor az akkumulátor feltölténiük tölténi kell.

ZÖLD FÉNY: a lift készen áll a működésre
NARANCSS FÉNY: csökkeni telepfeszültség, már csak egy fűtésre elegendő energia áll rendelkezésre
VÖRÖS FÉNY: a telep lemerült – a liftet már csak emelni lehet. Töltés szükséges.

Sürgősségi gomb:




Bármely esetben, amikor a lift azonnali megállításra szükséges, nyomja meg a piros, sürgősségi gombot. Az újra indításhoz nyomja meg a zöld bekapsoló gombot.

A kádifit automatikusan kikapcsol 30 perc állás után. Amennyiben Ön szeretné kikapcsolni a készüléket, akkor nyomja meg a vörös gombot.

A lift használata a kádban:

1. A használat előtt győződjön meg róla, hogy a távirányító megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez. A jack dugó vörös gyűrűjét nem szabad látni, ha megfelelően van csatlakoztatva. Kapcsolja be a zöld bekapsoló gombot. Ekkor a LED zölden világít.
2. Nyomja meg a feltétlenül mozgó gombot és tartva lenyomva ameddig a lift teljesen fel nem emelkedik a legfelső pozícióba és leáll. Ez alatti magasság is választható később, akkor a kívánt magasságban engedje el az emelő gombot.
3. Hajtsa ki az ülés szárnyait a kád szélére. Mozgassa a liftet addig a pozícióig, hogy a szárnyak az ülésrel egy magasságban legyenek.
4. Ujján rá a liftre és csúszson az ülés közepére.
5. Engedje le a liftet a stüllyesztő dombból. Amikor a lift elért a legalsó pozícióját a háttámla kezd el dőlni. A háttámla addig dől amíg a gombot nyomva tartja, vagy előre a leghátsó pozícióját (50 fok).
FIGYELEM: ha a háttámla elért a kád hátsó falát, azonnal engedje el a gombot.
6. Fűtés után nyomja meg az emelő gombot és emelje fel a liftet a kád felső szintjéig.
7. Csúszson ki az üléstől a kád szélére és szálljon ki.

A kádifit kikapcsol kb. 30 perccel a bekapsolást követően. Újra indításhoz nyomja meg a piros gombot.
A lift mozgatásakor a kezelő helyezze az öltét, vagy a combját.
Amennyiben a liftet a kádban hagyja, távolítsa el a távirányítót a lemerülés elkerülése érdekében.

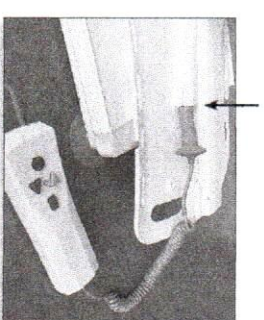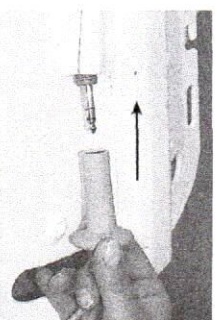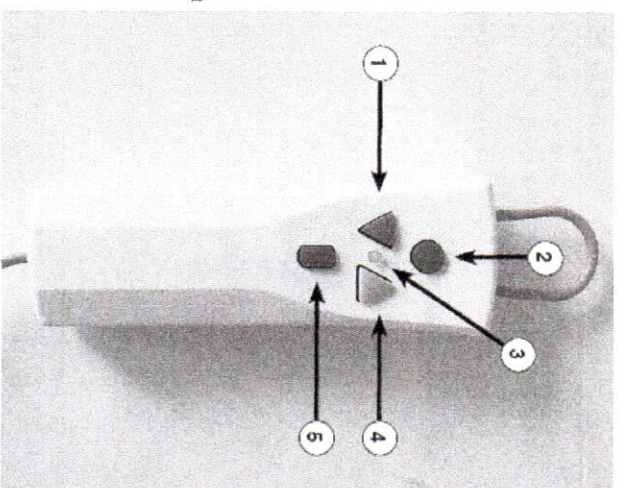

Forgalmazza: MIDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:88/412-186
e-mail: info@gyogyaszati.hu web: www.gyogyaszati.hu



Forgalmazza: MIDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:88/412-186
e-mail: info@gyogyaszati.hu web: www.gyogyaszati.hu




A lift eltávolítása a kádából:

Engedje le a kádifitet a legalsó pozíciójába és a háttámlát döntse a leghátsó pozícióba. Figyeljen rá, hogy a kád hátsó fala ne akadályozza a lift mozgását.


1. hajtsa be az ülés oldalszárnyait
2. használja a kialakított markolatokat a lift mozgatásához



3. győződjön meg róla, hogy a emelő rúd teljesen visszahúzódot-e

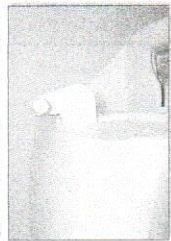

4. Ez követően távolítsa el a háttámla rész az ülőlapról. FIGYELEM: a háttámla csak bizonyos pozícióba állítható el. Teljesen lehajva nem távolítható el! Az alsó képen látható pozícióba hozza a háttámlát és ezt követően távolítsa el.

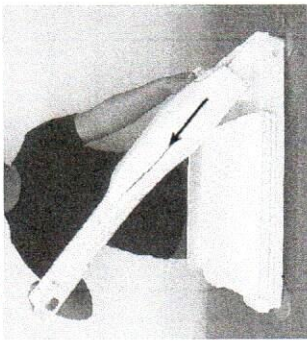

5. A tapadó korongok nyelvét húzza távolítsa el az aljzatot a kádból. Ha netán az előlő korongok a kádba tapadnak, azt később könnyedén el tudja távolítani.

Kádifit tárolása:

A kádifit karbantartás mentes, nincs szükség külön kenésre, olajozásra.

12 havonta javasolt átneézni a lift alkatrészeit, főként a teherhordó részeket, hogy nem érte-e sérülés. Az átnézés része legyen a teljes funkcionális teszt is. Amennyiben meghibásodást észlel azonnal jelezze a szerviznek, kereskedőjének.

Tisztítás:

A kádifit megfelelő karbantartáshoz hozzátartozik, hogy fürdést követően tisztítsa meg. Többnyire elegendő a meleg vízzel történő lezuhanyozás. Amennyiben erősebb szennyeződést éri a liftet, akkor használjon általános tisztítószert.

Az üléstakaró karbantartása:

A takaró a sima felszínű és az antibakteriális tulajdonsága miatt higiénikus, könnyen tisztítható. A takaró kézzel tisztítható, vagy mosógépben 60 fokon. Olyan mosószer használható, amely nem rendelkezik enzimatikus tulajdonsággal. Fürdőolaj, vagy színezéket tartalmazó mosószer, mosakodó szerék a takaró elszíneződéséhez vezethetnek. A takaró tisztításának elhanyagolása is elszíneződéssel járhat. A takaró elszíneződése normál használat mellett is előfordulhat, erre a garancia nem terjed ki. A takaró eltávolítása rendkívül egyszerű. A szárítást egyszerű szárítással végezze.

A kádifit karbantartása:

A kádifit karbantartást nem igényel, kemést-olajozást igénylő alkatrésze nincs.

12 havonta nézze át a kádifit fő alkatrészeit, különös tekintettel a teherhordó alkatrészekre. Ekkor végezze el a kád összes funkcionális tesztjét is. Amennyiben olyan hibát észlel, amely érintheti a kádifit működését, akkor annak kijavítását ne használja. A javítást szakmunkhelyben, erre kiképzett személyvel végeztesse.

Tisztítás:

Használat után minden esetben zuhanyozza le meleg vízzel a kádifitet azért, hogy a szennyeződéseket eltávolítsa. A vegyszerez tisztításhoz egyszerű általános tisztítószert használjon.

Üléstakaró karbantartása: Az üléstakaró erre kifejlesztett nagyon sima felszínű és antibakteriális tulajdonságú anyagból készült. Az üléstakaró erre kifejlesztett nagyon sima felszínű és antibakteriális tulajdonságú anyagból készült. Időszakos tisztítás akár kézzel, akár 60 fokos gépi mosással végezhető. A mosáshoz nem enzimatikus tulajdonságú tisztítószert használható csak. Fürdőolajok, vagy egyéb fürdőszerekhez adott anyagok a takaró elszíneződését okozhatják. Az elszíneződés normál használat mellett is bekövetkezhet. Ez a funkcióját nem befolyásolja és nem tartozik garanciális körbe.

NE FELEDJE:

- a takaró könnyen eltávolítható a tisztításhoz
- ne szárítsa a takarót elektromos szárítóban
- általános tisztítószert alkalmas a tisztításra

A töltő karbantartása:

A töltő nem igényel karbantartást. A tisztítást oldószert mentes közepes erősségű detergenssel és puha ruhával végezze. Víz ne jusson be a töltő belsejébe. Újra használat előtt győződjön meg, hogy kiszáradt-e teljesen.


A tároló akkumulátor feltöltése:

Mindig győződjön meg, hogy az akkumulátor felöltött-e teljesen használat előtt. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 220V.

1. dugja össze a töltőt és a távirányító megfelelő részét
2. dugja be a konnektorba a töltőt. A távirányító piros lámpája világítani kezd és zöldre változik, ha a töltés megtörtént. A teljes töltési idő kb 4 óra. A töltő automatikusan megszakítja a töltést kb 4 óra elteltével, azért, hogy a töltést megakadályozza.
3. távolítsa el a töltőt a konnektorból
4. válassza szét a töltőt a távirányítótól


FONTOS:

- amennyiben a kontrol lámpa nem világít a hálózatba való bedugáskor, akkor ellenőrizze, hogy a töltő és a távirányító kapcsolata biztos-e
- a töltős csak száraz helyiségben használja, fürdőszobában soha sen

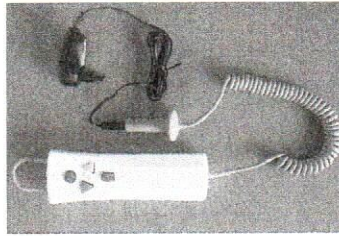

Szállítás:

1. mindig távolítsa el a távirányítót a szállítás előtt a készülékről
2. fixen rögzítse a szállítást alatti a kádifitet
3. amennyiben hideg közegben történik a szállítás, akkor újra használat előtt az akkumulátor engedje felmelegedni szobahőmérsékletre
4. az ülőrészt súlya 5,5 kg, a vezérlő háttámla rész súlya 3,8 kg
5. a képen látható módon a kádifit egyben és szétszerelt állapotban is szállítható

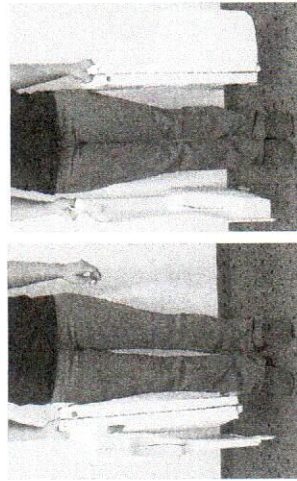

Forgalmazza: MDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:88/412-186
e-mail: info@gyogyszati.hu web: www.gyogyszati.hu




Forgalmazza: MDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:88/412-186
e-mail: info@gyogyszati.hu web: www.gyogyszati.hu

Technikai adatok:

Teljes hossz: 830 mm
Teljes szélesség: 700 mm
Ülőlap szélesség: 350 mm
Ülőlap mélysége: 420 mm
Az ülőlap teljes hossza: 570 mm
Ülőfelület minimális magassága: 60 mm
Ülőfelület maximális magassága: 480 mm
Hátánálja hossza: 640 mm
Hátánálja szélessége: 370-360 mm
Hátánálja dőlésszöge: 10-50 fok
Alízai szélessége: 310 mm
Alízai hossza: 560 mm
Maximális terhelhetőség: 140 kg
Teljes súly: 9,3 kg
Távirányító súlya: 0,4 kg
Vezérlőegység súlya: 3,8 kg
Ülőpozíció súlya: 5,5 kg
Egy emelési ciklus ideje: 50 s
Működési feszültség: 12V
Automatikus kikapcsolás: max 30 min
Teljesítmény: 90W 12 V
Működési környezeti hőmérséklet: 10-50 fok
Szállítási környezeti hőmérséklet: -10-+40 fok

Garancia: 12 hó

Eladás kelte:

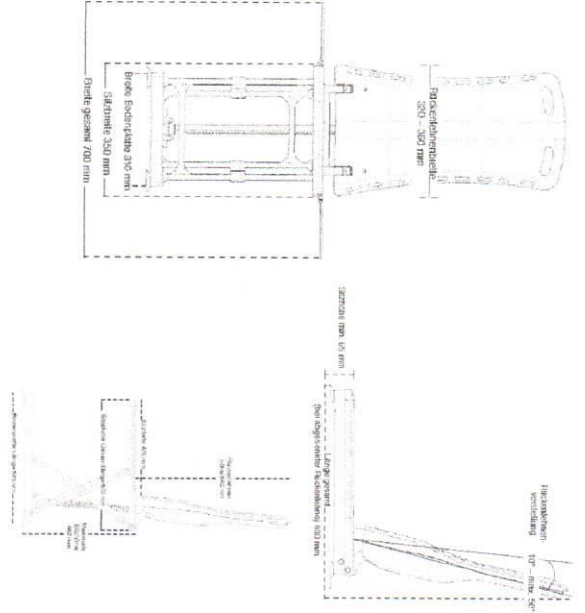

Forgalmazó aláírás, pecsét:

Gyártói címke:

- 1 Cikkszám |
- 2 Cikk neve |
- 3 Gyártó |
- 4 Sorozat szám |
- 5 UDI kód |
- 6 Max. rakomány |
- 7 Kövesse az utasításokat használatra |
- 8 Orvosi eszköz |
- 9 Gyártási dátum (év-hónap)



Forgalmazza: MDIGOR BT
8200 Veszprém, Bezerédi u. 2. Tel:86/412-186
e-mail: info@gyogyszazati.hu web: www.gyogyszazati.hu



