

Epi-med® (48001)

Epicondylitis ortézis

Rendeltetés meghatározása:

Az Epi-med® egy epicondylitis pánt. Az ortézist kizárólag a könyökön szabad alkalmazni. A jelen termék megköveteli, hogy a kezelőszemélyzet szakszerűen és személyre szabottan illessze a pácienshez.

Működési elv:

Az Epi-med® epicondylitis ortézis a könyök alatt összeszorítja az alkar izomzatát, ezáltal mechanikusan tehermentesíti az inak tapadási pontját az epicondylusnál (csontbütyöknél) továbbá a nyújtó- és hajlítóizmokat. A könyökízület terhelési zónáinak ezen biomechanikus változása érezhető javuláshoz vezet, gyakran a panaszok teljes megszűnését eredményezi.

Indikációk:

- Könyöktáji tendopathia (az ízületi nyúlványok gyulladásai)
- Epicondylitis humeris medialis (golf-/dobókönyök).
- Epicondylitis humeris lateralis (teniszkönyök)

Ellenjavallatok:

Nagy felületű bőrsérülések vagy megbetegedések, kiterjedt hematóma vagy erős duzzanat.

Mellékhatások:

Szakszerű alkalmazás esetén mellékhatások jelenleg nem ismertek.

Óvintézkedések:

Kövesse a terméket felíró vagy kiszolgáló szakember tanácsait. Kényelmetlenség esetén forduljon szakemberhez.

Szobahőmérsékleten tárolja, lehetőleg az eredeti csomagolásban. Higiéniai és hatékonyságbeli problémák miatt a rögzítőt más páciens kezelésére felhasználni nem szabad. A termékkel összefüggésben előforduló összes súlyos esetet jelenteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak a hatósága felé, amelyben a felhasználó és/vagy páciens lakóhelye található.

hu

Felhelyezési útmutató:

Az Epi-med® ortézist a nyitott oldalával kívülről befelé az alkarra kell helyezni, a nagyobb pelotta az alkar felső oldalára fekdjön rá középirányba, vagyis a test felé kicsit eltolva.

Az Epi-med® ortézist végül a rugalmas pánttal kell lezárni.

A pántot ehhez erősen, de nem túl szorosan kell a tépőzárral rögzíteni. Ellazult izomzat mellett az Epi-med® ortézis nem fejthet ki érezhető nyomást, csak az alkar izomzatának megfeszítésekor jöhet létre kompresszió.

Ápolás:

Kézi mosás. A vizet óvatosan nyomkodja ki belőle, és hőforrástól távol szárítsa.

Anyagösszetétel:

Műanyag csat

100 % polikarbonát

Tépőzárak

100 % poliamid

Párna

55 % gyapjú, 45 % viszkóz

Rugalmas heveder

76 % poliamid, 16 % viszkóz,

8 % elaszt