



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**Felhajtható tusoló ülőke  
V1214519**



### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ragassza a furatok elhelyezkedését jelző kartonpapírt (A) egy ragasztószalag segítségével a falra (D). Vízszintező (B) használatát javasoljuk, hogy a kartonpapír teljesen vízszintes legyen. Fúrja be a lyukakat (C) a falba a kartonpapíron (A) megjelölt helyeken.

Távolítsa el a kartonpapírt a falról, helyezze a tipliket a lyukakba (C). A tartókonzol (E) lyukai (C) keresztül csavarja be a csavarokat a tiplikbe. Csavarhúzóval húzza meg a csavarokat, hogy a tartókonzolok stabilan illeszkedjenek a falhoz.

Vegye elő az ülőkét (D), és a tartóelemeit illesse az előzőleg falra szerelt tartókonzolokhoz (E).

A tartókonzolokhoz (E) tartózó csapokat dugja be a tartóelemekbe (G) az ábrán látható irányban. Szorítsa meg az anyát, győződjön meg arról, hogy kellően stabil-e.

A tartókonzol takaró kupakjának felső részét (H) helyezze a konzolok (G) fölé, és a képen látható módon húzza kifelé a széleit. Miután felhelyezte a takaró kupakok felső részeit, győződjön meg arról, hogy jól illeszkednek-e a falra.

Helyezze a tartókonzol takaró kupakjának alsó részét (I) a konzolok (G) alá, úgy, hogy összeilleszthetők legyenek a takarókupak felső részével (H). Ennek érdekében finoman nyomja meg a kupakokat a felső takarókupak szélei közé.

A mellékelt csavarokat csavarhúzó segítségével csavarja be a lyukakba (L), amíg az alsó rész (I) és a felső rész (H) nem illeszkedik tökéletesen. FONTOS: ne húzza túl a csavarokat!

### FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

Amennyiben a felhajtható tusoló ülőke eltörne vagy sérülne az összeszerelés során, ne használja az eszközt. Lépjen kapcsolatba a kereskedőjével, hogy kicserélje a meghibásodott alkatrészt vagy a teljes eszközt.

Mindig győződjön meg arról, hogy a fal kellően erős-e egy ilyen eszköz megtartására.

### TISZTÍTÁS

85 C fokon 1 percig autoklávban sterilizálható, mosogatógépben vagy kézzel is mosható nem maró hatású mosószerekkel.

**MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG:** 110 kg, ne terhelje túl!

### MŰSZAKI ADATOK:

A műanyag részek anyagösszetétele: polipropilén

A fém részek anyagösszetétele: szinterezett alumínium és rozsdamentes acél.

### JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva normál használat mellett 2 év jótállást biztosítunk anyag- és gyártási hibákra. A jótállás hatálya alá eső meghibásodások esetében biztosítjuk az eszköz javítását vagy teljes cseréjét. A jótállás nem vonatkozik a helytelen használatból, gondatlanságból eredő károkra és a normál használatból eredő kopásra. A kereskedő pecsétjének szerepelnie kell a jótállási jegyen. Amennyiben a jótállási időn belül gyártási hibát észlelne a terméken, ezen jótállási jegy kíséretében vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, aki kapcsolatba lép a forgalmazóval a jótállás érvényesítése végett.

**VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:**.....

### A KERESKEDŐ PECSÉTJE:

**Forgalmazza:** Thuasne Hungary Kft.  
Budapest, 1117 Budafoki út 60.  
Tel./fax: 1209-1143  
E-mail: [thuasne@thuasne.hu](mailto:thuasne@thuasne.hu)  
[www.thuasne.hu](http://www.thuasne.hu)

**Gyártja:** Rehab Innovation Srl  
Via Privata OTO, 23, 19136 La Spezia  
– Olaszország

Őrizze meg az útmutatót!