

Nagy teherbírású kerekesszék
808527
Használati útmutató



RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

Ezeket a kerekesszékeket mozgásukban korlátozott fizikai vagy szellemi fogyatékos emberek számára tervezték. Lehetővé teszi mozgássérültek vagy mozgásukban korlátozott személyek szállítását, és a beteg maga (ha van 20-24"-es hátsó kerekei) vagy kíséző segítségével mozgásra használható. Ha a kerekesszék 50-60 cm átmérőjű hátsó kerékkel és a keréken lévő kézi peremmel rendelkezik, a felhasználó önállóan mozoghat

MŰSZAKI ADATOK Lásd az A. MELLÉKLETET

MÉRETEK Lásd a B. MELLÉKLETET

ÖSSZESZERELÉS Lásd az A. MELLÉKLETET

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt. Ha nem érti a használatot vagy az óvintézkedéseket, forduljon a kereskedőhöz vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert kárt okozhat.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a termékkel.
- Ne lépje túl a maximális hasznos terhelést.
- Mindig különös elővigyázatosság szükséges, ha olyan mozgó alkatrészek vannak, amelyek a végtag becsípődését és sérülését okozhatják.
- Ne kísérelje meg felemelni a kerekesszéket semmilyen eltávolítható résznél fogva.
- A kerekesszékebe való be- és kiszállás önállóan is végrehajtható, feltéve, hogy megfelelő mozgásképességgel és felsőtest-erővel rendelkezik.

FONTOS!

Ennek a kerekesszéknek a felépítése a maximális biztonságot szolgálja. A felhasználók azonban veszélybe kerülhetnek, ha nem megfelelő kerekesszéket használnak. Saját biztonsága érdekében a következő szabályokat kell betartani. A nem meghatározott vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a balesetek kockázatát.

- Mindig viseljen világos színű ruhát, ha sötét helyen mozog, hogy másoktól könnyebben elérhető legyen.
- Legyen óvatos az első edzés során ebben a kerekesszékben.
- Ismerje meg kerekesszékét.
- Használja tolószékét vízszintes talajon, valamint emelkedőn és lejtőn.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha térdei közé nyúlva kell felemelnie azokat a padlóról.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha az ülésre kell felmennie.
- Ne használja utakon vagy autópályákon.
- Ne kíséreljen meg felmászni vagy leereszkedni vízzel, jéggel vagy olajréteggel.
- Ne használjon a MOBIÁK által jóváhagyottaktól eltérő, nem engedélyezett alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket.
- Ne álljon a tolószékben.

HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e, hogy garantálja a termék biztonságos használatát. (Nincs repedés vagy törés a kereten)
2. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve.
3. Ellenőrizze, hogy az ülés teljesen nyitva van-e. Ha nem, nyomja le az ülést az oldalsó keretről.
4. Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik-e.
5. Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék abszolút biztonságos használatát emberek és tárgyak számára.
6. Ha vannak gyorskioldó tengelyek, ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak-e rögzítve.
7. Ellenőrizze a gumiabroncsokat, a gumiabroncsok nyomását (ha szükséges) és a kerékszárakat (fékeket). A fékek nem működnek megfelelően, ha túl alacsony a nyomás, vagy túl hosszú a rés a gumiabroncs és a kerékszárak között.

FIGYELEM!

A következő módszereket csak tapasztalt betegeknél szabad alkalmazni. Ha nem tapasztalt, kérjen segítséget egy kísérőtől.

FELÜLÉS A KERESŐSZÉKBE:

1. Helyezze el a kerekesszéket a lehető legközelebb magához.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Karjával támaszkodjon a keretre, és lassan menjen le az ülés felé.

KIÁLLÁS A KERESŐSZÉKBŐL:

1. Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb ahhoz az üléshez, amelyre átszáll.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Egyformán támaszkodnia kell mindkét fogantyúra. Csak az egyik kéz megtámasztása (és felügyelet nélkül) sérülést okozhat.
4. Helyezze a testsúlyt az áthelyezni kívánt ülésbe.

EGYÉB UTASÍTÁSOK:

1. Mindig használjon felvonót és rámpát. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, két kísérő segítségével érheti el a célt. A kerekesszéket a keret stabil részeinél fogva kell emelniük. A tolószéket soha nem szabad felemelni, amíg az utas ül. Csak tolni szabad.
2. Kerülje a lépcsőket vagy az akadályokat, ellenkező esetben kérjen segítséget a kísérőtől:
3. Ez a kerekesszék kizárólag személy szállítására használható az ülésen.
4. A felhasználók semmilyen közlekedési eszköz használata közben ne üljenek tolószékben.
5. A kerekesszékek hátsó kerekein fék található, amelyet rögzíteni kell, amikor a kerekesszék nem mozog.
6. NE nyomja a lábtartókat, hogy üljön vagy felálljon, **FELKÜLÉS VESZÉLYE**. A lábtartókat a felhasználó használja, amikor ül.
7. NE érintse meg a mozgó alkatrészeket mozgás közben **SÉRÜLÉSVESZÉLY**

KARBANTARTÁS:

Az alábbi eljárások rendszeres felülvizsgálata segít megőrizni kerekesszéke élettartamát és hatékonyságát.

HETI

1. Ellenőrizze a keréknyomást a kerekeken lévő utasításokat követve.
2. Ellenőrizze, hogy a keresztirányú kar központi csavarja meg van-e húzva és jó állapotban van.
3. Tisztítsa meg a szövetet szappanos vízzel vagy megfelelő mennyiségű tisztítószerrel.
4. Tisztítsa meg a szék fém részeit száraz ruhával vagy speciális króm felületekre vagy festett felületekre alkalmas szerekkel.
5. Ellenőrizze a kerékcsavarokat, és szükség esetén állítsa be.
6. Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az első és a hátsó kerekek.

NEGYEDÉVENKÉNT

1. Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be: kerékvillák, húzókerekek, légcsavarok.
2. Zsírozzon vagy olajozzon minden alkatrészt, amely súrlódásnak vagy kopásnak van kitéve.
3. Húzza meg a csavarokat és az anyákat.
4. A szék állapotának általános felülvizsgálata és a szükséges javítások.

ÉVENTE

1. Javasoljuk, hogy évente egyszer végezzen teljes körű felülvizsgálatot szakképzett szolgáltatóval.
2. A páciens biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a kerekesszéket 2 évente ellenőrizze a gyártó. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

TISZTÍTÁS:

A karbantartás és az ellenőrzés mellett a keret és a kárpit is alaposan megtisztítható.

- Annak érdekében, hogy megőrizze megjelenését, az anyagot rendszeresen tisztítani kell.
- A szennyeződésekelt szivaccsal és enyhe mosószerrel lehet eltávolítani meleg vízzel, a textúra irányába söpörve.
- Öblítse le tiszta vízzel, mielőtt megszáradna.
- NE hagyja nedvesen a kerekesszéket.
- Ne tegye az anyagot szárítógépbe. Ha a szennyeződés mély, a felületet puha kefével kell megtisztítani.
- A keretet rendszeresen tisztítani kell enyhe tisztítószerrel.
- A bőrüléssel kerekesszékeket száraz ruhával kell megtisztítani.
- Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal. Ügyeljen a kerekek szárítására. veszélyes a tolószék használata nedves kerekkel.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőt.
- Védje a tárgyat a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

VIGYÁZAT (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben
- A MOBIAS S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- A MOBIAS S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására
- Van egy $\pm 3\%$. Eltérés a termékek méretétől.

KÖRNYEZETVÉDELME:

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

ESEMÉNY JELENTÉS: Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT: Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

GARANCIA:

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM TARTALMAZZA azokra a károkra, amelyek helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából erednek. NEM takarja el azokat az alkatrészeket, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódhatnak, mint például a kárpit, a kerekek vagy a fékek.

Természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben), fuvarozókra nem vonatkozik a garancia.












Semmilyen szervizre vagy pótalkatrészre nem terjed ki a fedezet, kivéve, ha azokat egy felhatalmazott szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a felhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti.

A. MELLÉKLET ELŐÍRÁSOK

Kód	Leírás
0808527	Nagy teherbírású kerekesszék

Váz	Acél
Váz	Összecsukható
Szín	Piros-Fekete
Ülés	Szövet béléssel
Karfák	Összehajtható
Lábtámak	Levehető és állítható hosszágú
Hátsó kerék	Mag szilárd
Első kerék	Tömör
Dőlésmentes görgő	Nem
Kisérő Fék	Nem
Maximális terhelhetősége	182 kg
Extra	Dupla rúd
Mankótartó	Kód: 0811369

B. MELLÉKLET MÉRETEK

											
0808527	56 cm	56 cm	45 cm	44 cm	74 cm	110 cm	91 cm	50 cm	24" 8"	182 Kg	20,5 Kg


C. MELLÉKLET ÖSSZESZERELÉS

A tolószék, amelyet a kezében tart, eltérhet a következő képeken láthatótól. Az összeszerelési folyamat hasonló.



Nyitás: Fogja meg a fogantyúkat és húzza kifelé, majd nyomja le az ülés oldalán lévő rudakat, amíg a kerekeszék teljesen ki nem nyílik.


Bezárás: Kövesse a fordított eljárást.

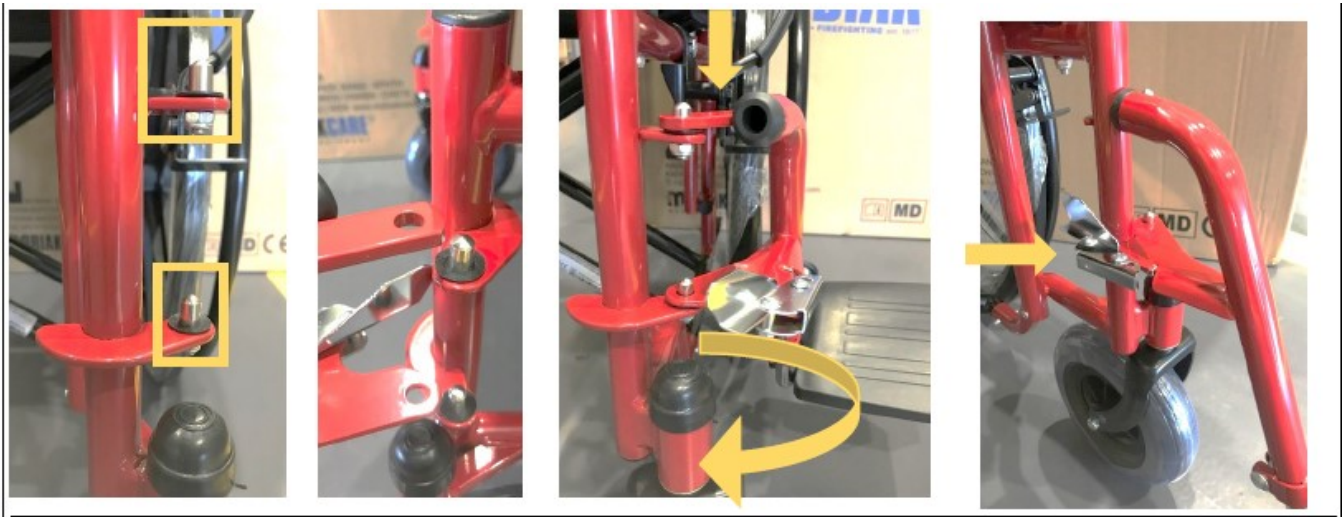

Szerelje össze a lábtámaszt úgy, hogy az alkatrészen lévő zsanérlemezeket a kerekeszék vázán lévő csuklócsapokra szerelje. Nyomja a lábtámaszt a kerekeszék belseje felé, amíg a helyére nem kattán. Ismételje meg ugyanezt az eljárást a másik lábtámasznál. Távolítsa el a lábtámaszt a kioldókar megnyomásával, forgassa kifelé, emelje le a lábtámaszt a csuklócsapszegekről.




A lábtámasz hosszának beállításához használja a termékcsomaghoz mellékelt szerszámot. Lazítsa meg a csavart, és rögzítse a kívánt hosszúságra. Használja a mellékelt lábtámasz övet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a beteg lába megfelelően helyezkedik el.

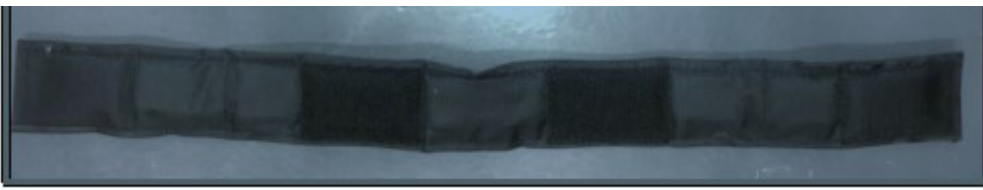




Terméke használatra kész.

A fékek a kerekesszék rögzítésére szolgálnak, ha az álló helyzetben van, hogy megakadályozza az elgurulást. A fék bekapcsolásához nyomja előre a fékkart a tenyérrel. (1) A fék kioldásához húzza hátra a fékkart az alsó ujjakkal (2)

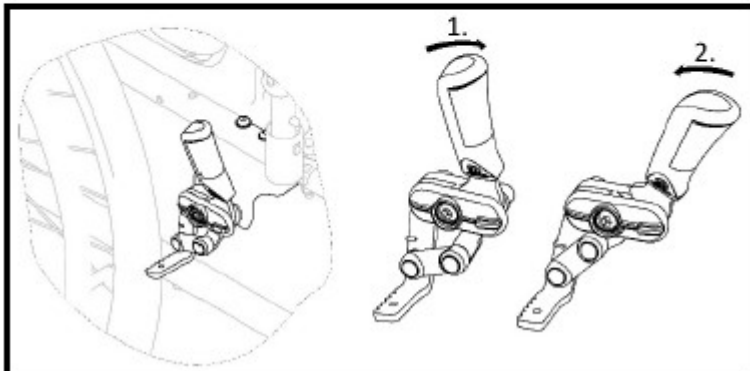

Soha ne húzza be a rögzítőféket mozgás közben. Ne húzza be a rögzítőféket, hogy lelassítsa a kerekesszéket. Ne támaszkodjon a rögzítőfékekre támaszkodás vagy áthelyezés céljából. Fék használata közben tartsa távol ujjait a mozgó alkatrészektől, kezét mindig a fékkaron tartsa.

A lehajtható kartámasz felemeléséhez nyomja meg a biztonsági kart, és húzza felfelé.

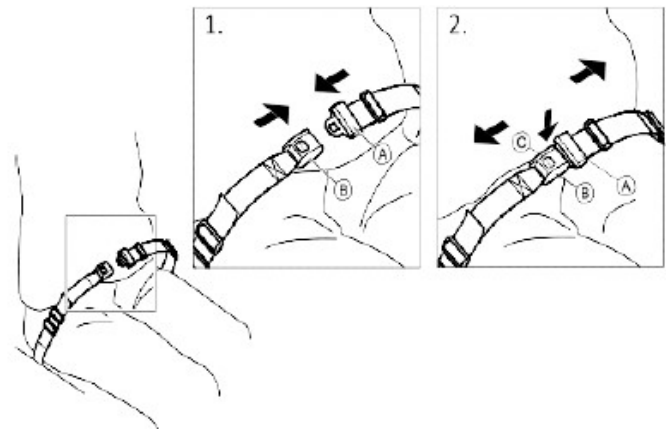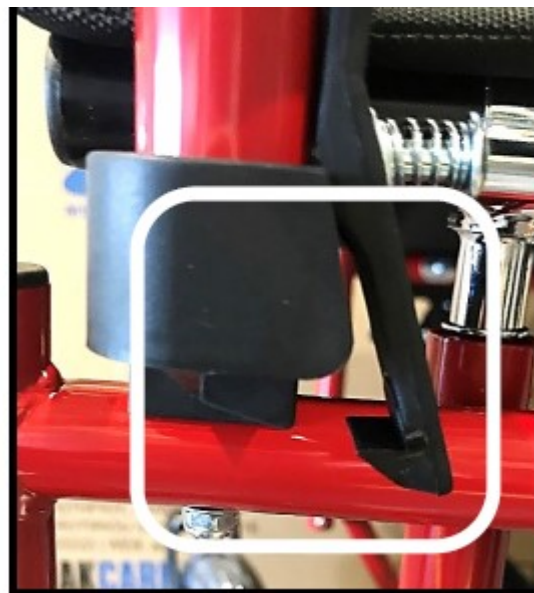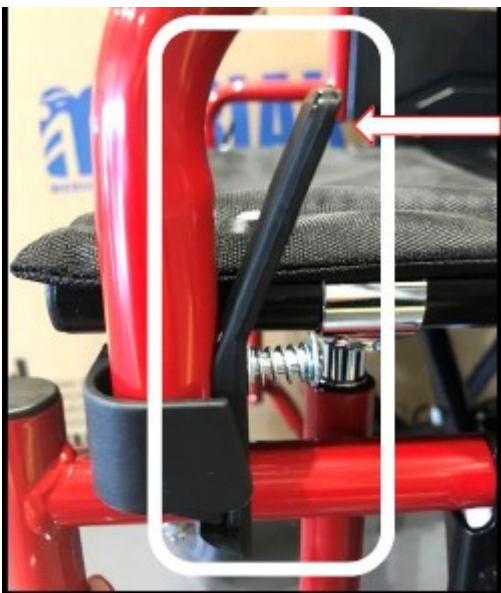

A kerekesszék biztonsági övvel is felszerelhető. (Opcionális Ref.:0806482 6 0806478 6 0808364 6 0809750 6 0804478).

Megakadályozza, hogy a felhasználó lecsússzon a kerekesszékben vagy kiessen a kerekesszékből. A laza öv lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy lecsússzon, és fulladásveszélyt jelenthet. Ügyeljen arra, hogy teljesen hátradőljön az ülésben, és hogy a medence a lehető legegyenesebb és szimmetrikusabb legyen.

A záráshoz nyomja be az A reteszt a B csatkapocsba.

A kinyitáshoz nyomja meg a C gombot, és húzza ki az A reteszt a B csatkapocsból.