

TERMÉKISMERTETŐ ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SOFT WC magasító (W1550001001)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A terméket a meglévő WC kagylóra kell helyezni. 11 cm-rel magasítja meg a WC ülökét. A felhasználó maximális súlya: 185 kg lehet. Súlya: 2 kg.

FIGYELMEZTETÉS

Ellenőrizze, hogy a WC, amelyikre ráhelyezné a magasítót, kellően stabil-e. Mindig ellenőrizze a WC magasító állapotát is felhelyezés előtt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- 1) Ellenőrizze, hogy a meglévő WC jól illeszkedik-e.
- 2) Helyezze a magasítót a WC kagylóra, miután felhajtotta az ülökét.
- 3) Ellenőrizze, hogy a karimák közre fogják-e kívülről és belülről a WC kagyló széleit.
- 4) Ellenőrizze, hogy elég stabilan illeszkedik-e a magasító!
- 5) A magasítót felfelé, függőleges irányban kell eltávolítani.

KEZELÉS

Naponta tisztítsa. Kerülje a súrolószerek alkalmazását. Sima felülete szappanos vízzel vagy klórmentes tisztítószerrel könnyen tisztítható. Autóklávban 5 percig 90 C°-on sterilizálható.

ANYAGÖSSZETÉTEL

Polipropilén külső borítás.

A GYÁRTÓ MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE/SZERVÍZ: THUASNE HUNGARY KFT.

BUDAPEST., 1117 Budafoki út 60. Tel.: 36-1-2091143 www.thuasne.hu

JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva normál használat mellett 1 év jótállást biztosítunk. A jótállásból természetes módon kizárt minden, a nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülés.

A kereskedő pecsétjének és a termék dobozán található gyártási számnak szerepelnie kell a jótállási jegyen. Amennyiben a jótállási időn belül gyártási hibát észlelne a terméken, ezen garancialevél kíséretében vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, aki kapcsolatba lép a forgalmazóval a jótállás érvényesítése végett.

A TB támogatással igénybe vett gyógyászati segédeszközök jótállási időn túli javítását a TB támogatja (olyan mértékben, ahogyan maga az eszköz is támogatást kap). A közgyógylistán szereplő eszközök javítása térítésmentes. Egy javítás ÁFA-mentes értéke (anyag, kiszállási-, és munkadíj együtt) nem haladhatja meg az eszköz támogatásának 60%-át. Egy termék javítására a kihordási időn belül maximum a termék közfinanszírozás alapjául elfogadott ára 130%-ának megfelelő összeg fordítható. Az ezt meghaladó javítási igény esetén az eszközt a gyártó vagy saját költségére javítja, vagy a kihordási idő végéig cserekeszüléket biztosít. A javításra való jogosultságot a szervízkönyvbe bevezetett adatokkal lehet igazolni. A szervízkönyv megőrzése az ügyfelek kötelessége.

GYÁRT. SZÁM:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:.....

TB SZERVÍZJOGOSULTSÁG UTOLSÓ IDŐPONTJA:.....

A KERESKEDŐ PECSÉTJE:

TERMÉKISMERTETŐ ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SOFT WC magasító (W1550001001)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A terméket a meglévő WC kagylóra kell helyezni. 11 cm-rel magasítja meg a WC ülökét. A felhasználó maximális súlya: 185 kg lehet. Súlya: 2 kg.

FIGYELMEZTETÉS

Ellenőrizze, hogy a WC, amelyikre ráhelyezné a magasítót, kellően stabil-e. Mindig ellenőrizze a WC magasító állapotát is felhelyezés előtt.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- 6) Ellenőrizze, hogy a meglévő WC jól illeszkedik-e.
- 7) Helyezze a magasítót a WC kagylóra, miután felhajtotta az ülökét.
- 8) Ellenőrizze, hogy a karimák közre fogják-e kívülről és belülről a WC kagyló széleit.
- 9) Ellenőrizze, hogy elég stabilan illeszkedik-e a magasító!
- 10) A magasítót felfelé, függőleges irányban kell eltávolítani.

KEZELÉS

Naponta tisztítsa. Kerülje a súrolószerek alkalmazását. Sima felülete szappanos vízzel vagy klórmentes tisztítószerrel könnyen tisztítható. Autóklávban 5 percig 90 C°-on sterilizálható.

ANYAGÖSSZETÉTEL

Polipropilén külső borítás.

A GYÁRTÓ MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE/SZERVÍZ: THUASNE HUNGARY KFT.

BUDAPEST., 1117 Budafoki út 60. Tel.: 36-1-2091143 www.thuasne.hu

JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva normál használat mellett 1 év jótállást biztosítunk. A jótállásból természetes módon kizárt minden, a nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülés.

A kereskedő pecsétjének és a termék dobozán található gyártási számnak szerepelnie kell a jótállási jegyen. Amennyiben a jótállási időn belül gyártási hibát észlelne a terméken, ezen garancialevél kíséretében vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, aki kapcsolatba lép a forgalmazóval a jótállás érvényesítése végett.

A TB támogatással igénybe vett gyógyászati segédeszközök jótállási időn túli javítását a TB támogatja (olyan mértékben, ahogyan maga az eszköz is támogatást kap). A közgyógylistán szereplő eszközök javítása térítésmentes. Egy javítás ÁFA-mentes értéke (anyag, kiszállási-, és munkadíj együtt) nem haladhatja meg az eszköz támogatásának 60%-át. Egy termék javítására a kihordási időn belül maximum a termék közfinanszírozás alapjául elfogadott ára 130%-ának megfelelő összeg fordítható. Az ezt meghaladó javítási igény esetén az eszközt a gyártó vagy saját költségére javítja, vagy a kihordási idő végéig cserekeszüléket biztosít. A javításra való jogosultságot a szervízkönyvbe bevezetett adatokkal lehet igazolni. A szervízkönyv megőrzése az ügyfelek kötelessége.

GYÁRT. SZÁM:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:.....

TB SZERVÍZJOGOSULTSÁG UTOLSÓ IDŐPONTJA:.....

A KERESKEDŐ PECSÉTJE: