



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### WC MAGASÍTÓ CSAVAROS (W18400)



#### Általános tudnivalók

6/10/14 cm-rel magasítja meg a WC ülőkét. Rendkívül stabil, mivel a WC tetejére 2 széles csavarógomb segítségével rögzíthető. Az elülső bevágás megkönnyíti az intim tisztálkodást. A felhasználó maximális súlya: 200 kg lehet. Fedéllel is kapható. Állíthatóság: 32-40 cm között.

#### Figyelmeztetés

Ellenőrizze, hogy a WC, amelyikre ráhelyezné a magasítót, kellően stabil-e. Mindig ellenőrizze a WC magasító állapotát is felhelyezés előtt, különös tekintettel a támaszkodó felületekre.

#### Felszerelés

- 1) Rögzítse a 2 L alakú rögzítőt a WC magasítóhoz: fordítsa a terméket fejjel lefelé egyenletes felszínen, és dugja a menetbe az L alakú rögzítőt. Gyengéden ütögesse a helyére a rögzítőket és óramutató járása szerint csavarja be ütközésig a helyére.
- 2) A rögzítőket a WC csésze méreténél szélesebbre állítsa be.
- 3) Helyezze a magasítót a WC kagylóra, miután felhajtotta az ülőkét. A csavarógombok a WC belső széle felé nézzenek.
- 4) Ütközésig csavarja be a rögzítőket, hogy megszűnjön a magasító oldalirányú elmozdulása.
- 5) Használat előtt győződjön meg a WC magasító stabilitásáról.
- 6)

**FIGYELEM:** A csavarógombos rögzítők könnyen állíthatók, ezért ha ellenállásba ütközik, hagyja abba a becsavarást.

#### Tisztítás, fertőtlenítés

Valamennyi alkatrésze meleg vízzel vagy semleges tisztítószerrel tisztítható. Alkoholos alapú fertőtlenítőszer használata megengedett. Az ülőke vízbe mártható vagy a rögzítők eltávolítása után 85 °C autoklávban 1 percig sterilizálható.

#### Műszaki jellemzők

Mérete: 40,7 X 36,6 cm.  
Kivágás: 26 x 20 cm.

#### Jótállás

A vásárlás napjától számítva normál használat mellett 1 év jótállást biztosítunk gyári meghibásodás esetére. A kereskedő pecsétjének és a terméken található gyártási számnak szerepelnie kell a jótállási jegyen. Amennyiben a jótállási időn belül gyártási hibát észlelne a terméken, a vásárlási bizonylat kíséretében vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, aki kapcsolatba lép a forgalmazóval a jótállás érvényesítése végett.

**Forgalmazza:** Thuasne Hungary Kft.  
Budapest, 1117 Budafoki út 60.  
Tel./fax: 1209-1143  
E-mail: [thuasne@thuasne.hu](mailto:thuasne@thuasne.hu)  
[www.thuasne.hu](http://www.thuasne.hu)

**Gyártja:** Thuasne 118-120, rue Marius AUFAN  
BP 243 - 92307 Levallois-Perret – Franciaország

**Őrizze meg az útmutatót!**



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### WC MAGASÍTÓ CSAVAROS (W18400)



#### Általános tudnivalók

6/10/14 cm-rel magasítja meg a WC ülőkét. Rendkívül stabil, mivel a WC tetejére 2 széles csavarógomb segítségével rögzíthető. Az elülső bevágás megkönnyíti az intim tisztálkodást. A felhasználó maximális súlya: 200 kg lehet. Fedéllel is kapható. Állíthatóság: 32-40 cm között.

#### Figyelmeztetés

Ellenőrizze, hogy a WC, amelyikre ráhelyezné a magasítót, kellően stabil-e. Mindig ellenőrizze a WC magasító állapotát is felhelyezés előtt, különös tekintettel a támaszkodó felületekre.

#### Felszerelés

- 7) Rögzítse a 2 L alakú rögzítőt a WC magasítóhoz: fordítsa a terméket fejjel lefelé egyenletes felszínen, és dugja a menetbe az L alakú rögzítőt. Gyengéden ütögesse a helyére a rögzítőket és óramutató járása szerint csavarja be ütközésig a helyére.
- 8) A rögzítőket a WC csésze méreténél szélesebbre állítsa be.
- 9) Helyezze a magasítót a WC kagylóra, miután felhajtotta az ülőkét. A csavarógombok a WC belső széle felé nézzenek.
- 10) Ütközésig csavarja be a rögzítőket, hogy megszűnjön a magasító oldalirányú elmozdulása.
- 11) Használat előtt győződjön meg a WC magasító stabilitásáról.
- 12)

**FIGYELEM:** A csavarógombos rögzítők könnyen állíthatók, ezért ha ellenállásba ütközik, hagyja abba a becsavarást.

#### Tisztítás, fertőtlenítés

Valamennyi alkatrésze meleg vízzel vagy semleges tisztítószerrel tisztítható. Alkoholos alapú fertőtlenítőszer használata megengedett. Az ülőke vízbe mártható vagy a rögzítők eltávolítása után 85 °C autoklávban 1 percig sterilizálható.

#### Műszaki jellemzők

Mérete: 40,7 X 36,6 cm.  
Kivágás: 26 x 20 cm.

#### Jótállás

A vásárlás napjától számítva normál használat mellett 1 év jótállást biztosítunk gyári meghibásodás esetére. A kereskedő pecsétjének és a terméken található gyártási számnak szerepelnie kell a jótállási jegyen. Amennyiben a jótállási időn belül gyártási hibát észlelne a terméken, a vásárlási bizonylat kíséretében vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, aki kapcsolatba lép a forgalmazóval a jótállás érvényesítése végett.

**Forgalmazza:** Thuasne Hungary Kft.  
Budapest, 1117 Budafoki út 60.  
Tel./fax: 1209-1143  
E-mail: [thuasne@thuasne.hu](mailto:thuasne@thuasne.hu)  
[www.thuasne.hu](http://www.thuasne.hu)

**Gyártja:** Thuasne 118-120, rue Marius AUFAN  
BP 243 - 92307 Levallois-Perret – Franciaország

**Őrizze meg az útmutatót!**