



## HASZNÁLATI UTASÍTÁS: Állványos ágykapaszzkodó

### MOBIAK 810650

USER MANUAL: LIFTING POLE WITH BASE II

**REF** : 0810650



#### **RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:**

A Monkey Pole elsősorban azoknak készült, akik ágyhoz kötöttek, és segítségre van szükségük, hogy ülő helyzetben felkeljenek és hátramenetben. Ez az ágy tartozéka, amely külön megvásárolható, opcionális és csak beltéri használatra készült. A termék falra vagy ágyra rögzítéséhez nincs szükség további kiegészítőkre. Nem úgy tervezték, hogy eltartsa a beteg teljes testtömegét. Nem arra tervezték, hogy egy személyt be- és kimozduljon az ágyból, csak segítségnyújtásra használható.

#### **VIGYÁZAT (!):**

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben.
- A MOBIAK S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretén végzett jogosulatlan módosításból eredő következményekért.

- A MOBIÁK S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
- Van egy  $\pm 3\%$ . Eltérés a termékek méretétől.
- Mindig ajánlott a vészhelyzeti reagálásra kialakított eljárások követése.
- A termék nem megfelelő használata sérülést okozhat a betegnek.
- Mindig konzultáljon orvosával.

#### **MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT:**

1. Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e a termék biztonságos használatának garantálása érdekében (nincs repedés vagy törés a keretben).
2. Sérülés esetén ne használja a terméket, és további utasításokért forduljon a forgalmazóhoz.
3. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve, és minden csavar rögzítve van-e és jól fel van-e csavarozva.
4. Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék abszolút biztonságos használatát emberek és tárgyak számára.
5. Rendszeresen ellenőrizze a szilárdságát és stabilitását.
6. Győződjön meg arról, hogy a padlófelület, amely a terméket alátámasztja, sík.
7. Mindig segítse a felhasználót a termék használata során

#### **TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS:**

- Csak nedves ruhát és enyhe szappant használjon azokon a felületeken, ahol meg kell tisztítani. Ezután alaposan szárítsa meg, mielőtt a terméket használná.
- Közvetlen napfénytől távol tartandó.
- NE hagyja nedvesen a terméket.
- Törölje le száraz, tiszta, puha ruhával.
- Ne használjon vegyi tisztítószeret a keret tisztításához. Ez károsíthatja a termék felületét.
- Soha ne használjon savakat, lúgokat vagy oldószereket, például acetont
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőszeret.
- Védje a tárgyat a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

#### **KÖRNYEZETVÉDELEM:**

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy az már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

**ESEMÉNY JELENTÉS:** Minden, a termék használatával kapcsolatos súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.


#### **GARANCIA:**

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM vonatkozik azokra a károkra, amelyek helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából erednek.

NEM VONATKOZIK azokra az alkatrészekre, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódnak. A jótállás nem vonatkozik a természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (ahol alkalmazható) és szállító által okozott károkra vagy hibákra. Szervizt vagy pótalkatrészt nem alkalmaznak, kivéve, ha azt hivatalos szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a végfelhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti.

<b>0810650</b>	
<b>Állványos ágykapaszkodó MOBIAK 810650</b>	
<b>Keret</b>	Acél
<b>Szín</b>	Bézs
<b>A földtől számított magassága</b>	174 cm
<b>Szélessége (földön)</b>	75 cm
<b>Hosszúsága (földön)</b>	89 cm
<b>Behajló rúd hossza</b>	72 cm
<b>Max terhelés</b>	136 Kg
<b>A termék nettó súlya</b>	16 Kg
<b>Műanyag fogantyúval (alkatrész kód: 0810573)</b>	
<b>A csomag méretei (Hosszúság x Szélesség x Magasság)</b>	91 x 78 x 32 cm
<b>A fő karton súlya</b>	19 Kg

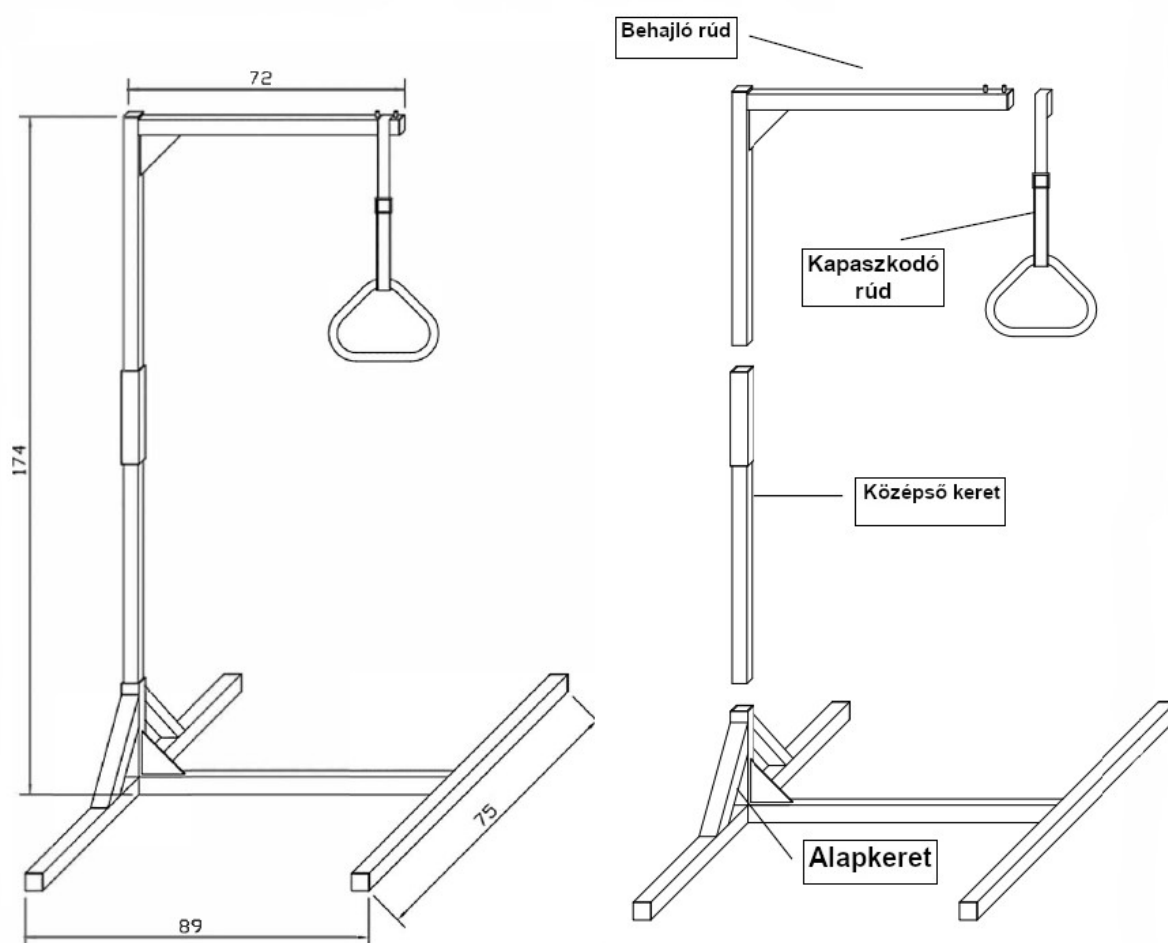

A címkére, a fő kartonra és/vagy a használati útmutatóra  
nyomtatott szimbólumok leírása

**LOT**

Tétel szám

**REF**

Termék szám



Ne használja ha  
csomagolás  
sérült



Olvassa el a  
használati utasítást



Csak beltéri  
használatra



Óvatosan kezelje

MBK Kód	GTIN-14	Magyar leírás:
0810650	05213006907289	Állványos ágykapaszkodó MOBIAK 810650

**IMPORTED BY**

MOBIAK S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: [www.mobiakcare.com](http://www.mobiakcare.com)